

Dijital vida tipi implant protezi çözümü


OSSTEM[®]
IMPLANT

TS Multi Ti Base

- Total dişsiz vakalarda mükemmel implant-protez uyumu
- Spreysiz taratılabilen Metal Scan Body
- Çeşitli klinik ortamlar için eksiksiz ürün yelpazesi
- Resmi kütüphanelerle kolay dijital iş akışı

Total dişsiz vakalarda mükemmel implant protez uyumu

- Doku seviyesinde protez ve implantı sıkılaştırmak için TS Multi Abutment ile birlikte kullanılır.
- Dijital 3D baskı, kazıma cihazıyla üretilen kesin protez

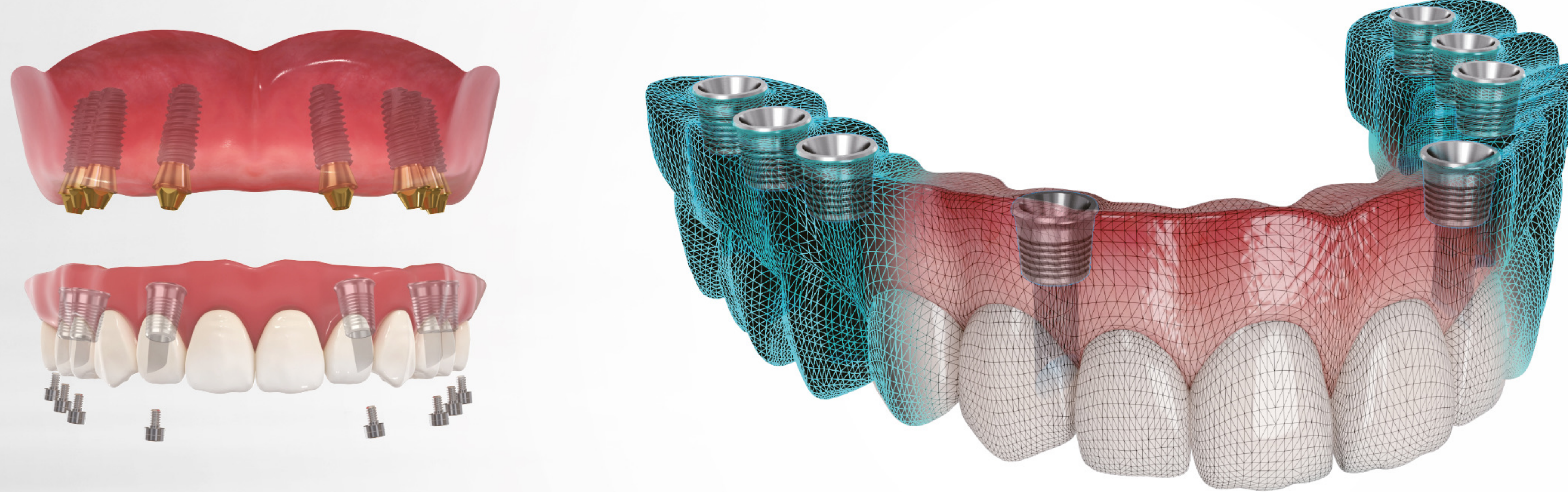

Spreysiz taratılabilen Metal Scan Body


- Özel kaplama işlemi, spreysiz olmanın hızlı ağız taramasına izin verir.
- Tek elle kolayca sabitlenebilen hepsi bir arada yapı



Işık yansımaları olmadan özel kaplama Scan Body



Total dişsiz vakalarda bile hızlı tarama

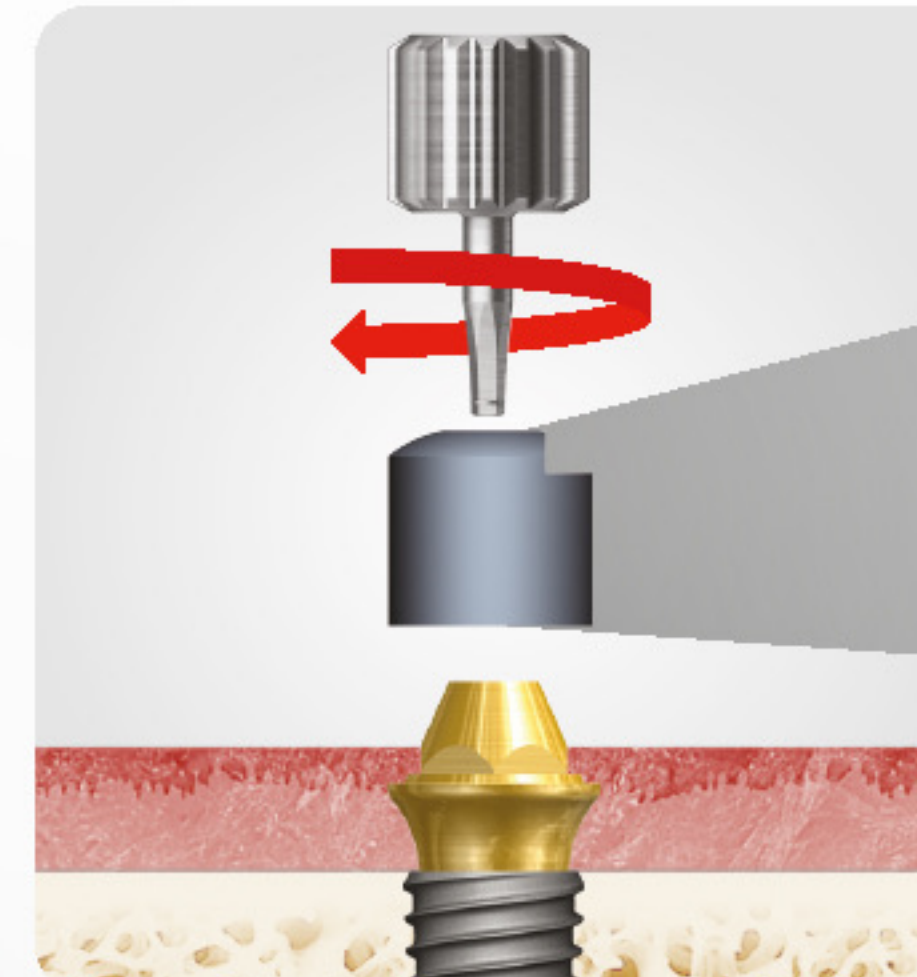


Vida entegreli Scan Body



Scan Body tarama gövdesi kesit yapısı

Çeşitli klinik ortamlar için eksiksiz ürün yelpazesi

- 17/30° Multi Angled Abutment ve G/H 1/2/3/4/5mm TS Multi Abutment arasında seçilebilir
- Yapılan protezin dikey mesafesine göre 4-6mm Multi Ti Baş, geçici protez içinse 10° Ti Base seçeneği bulunur

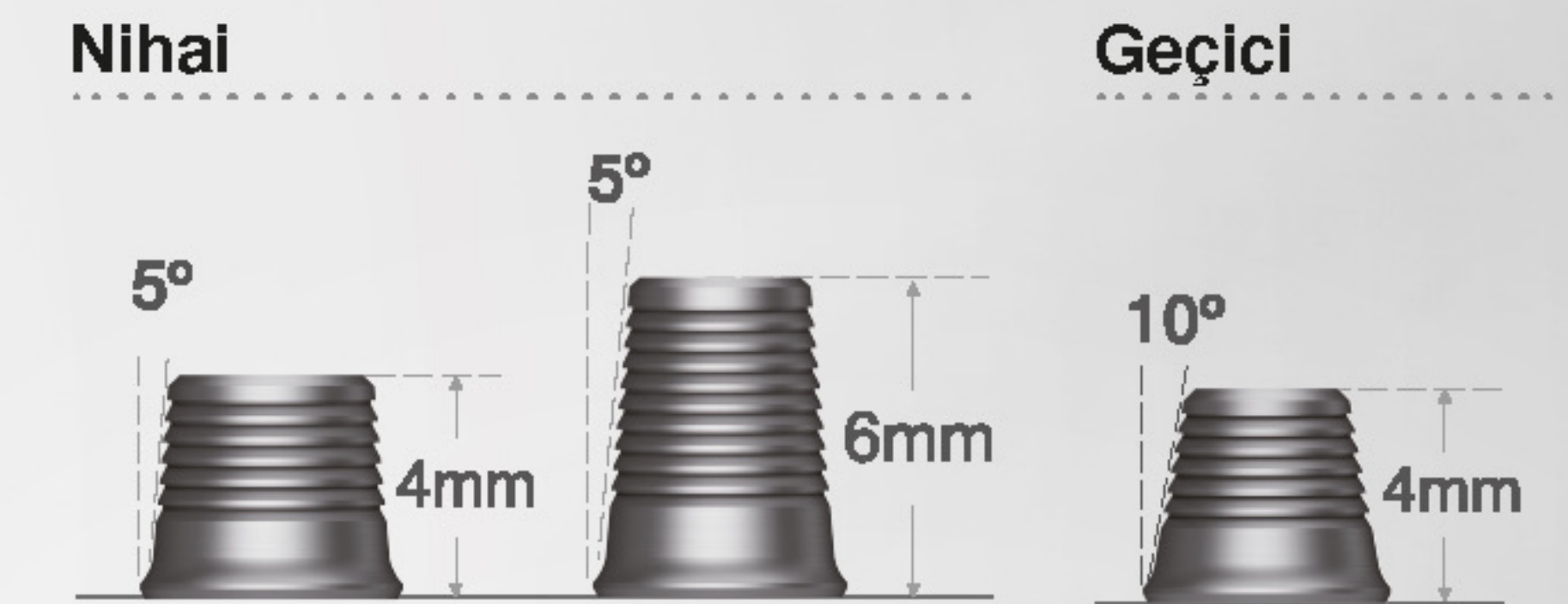

Multi ABT.



Multi angled Abutment(17°)

Multi angled Abutment(30°)



TS Multi Ti Base


Resmi kütüphanelerle kolay dijital iş akışı

- 3shape, ExoCAD için sağlanan Osstem Resmi Scan Body - Ti Base kütüphanesi
- %100 dijital yöntemle tam dişsiz vakalar için optimize edilmiş yeni implant protetik tedavisi


1 OneGuide Planlaması




2 OneGuide İmplant Yerleştirme

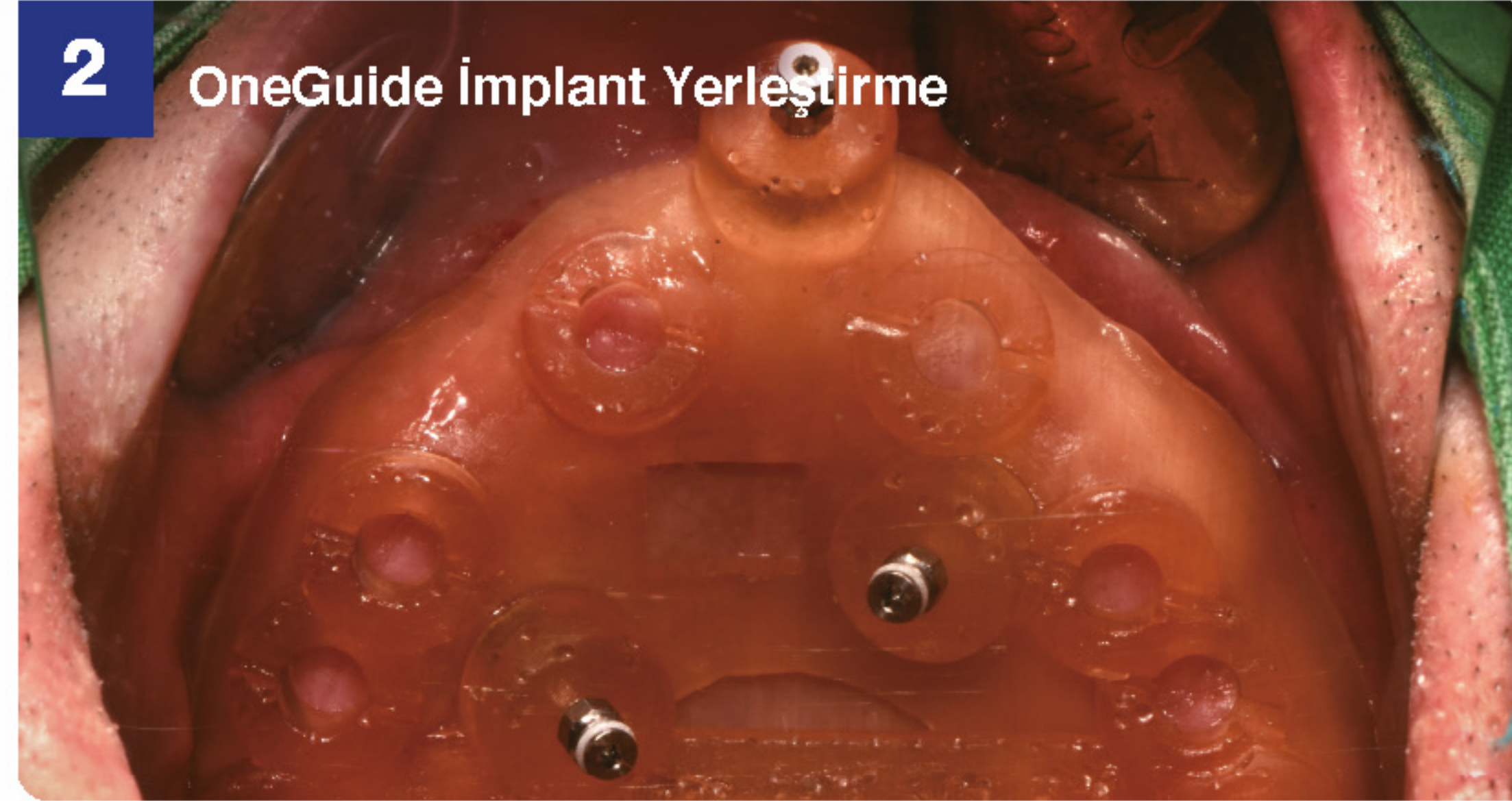


3 Multi/Multi Angled abutment hazırlanışı

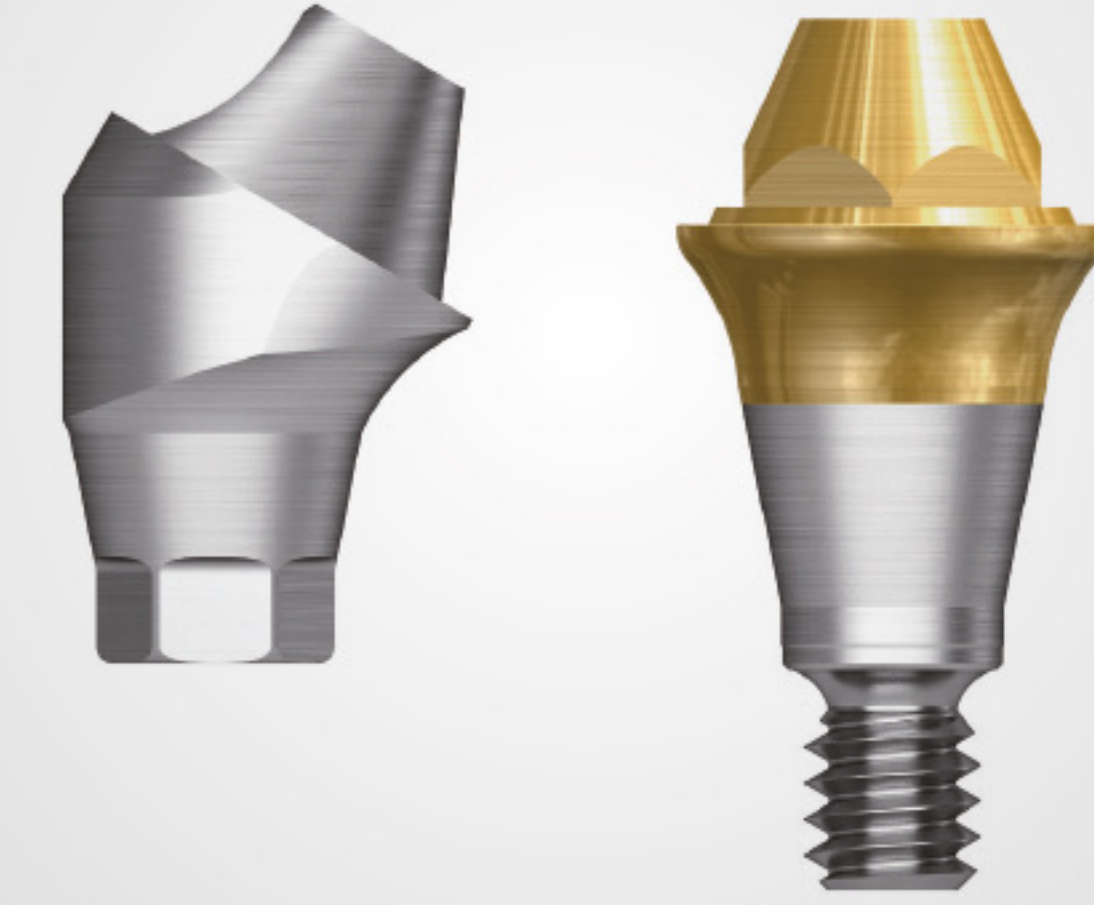


4 Multi/Multi Angled abutment bağlantısı

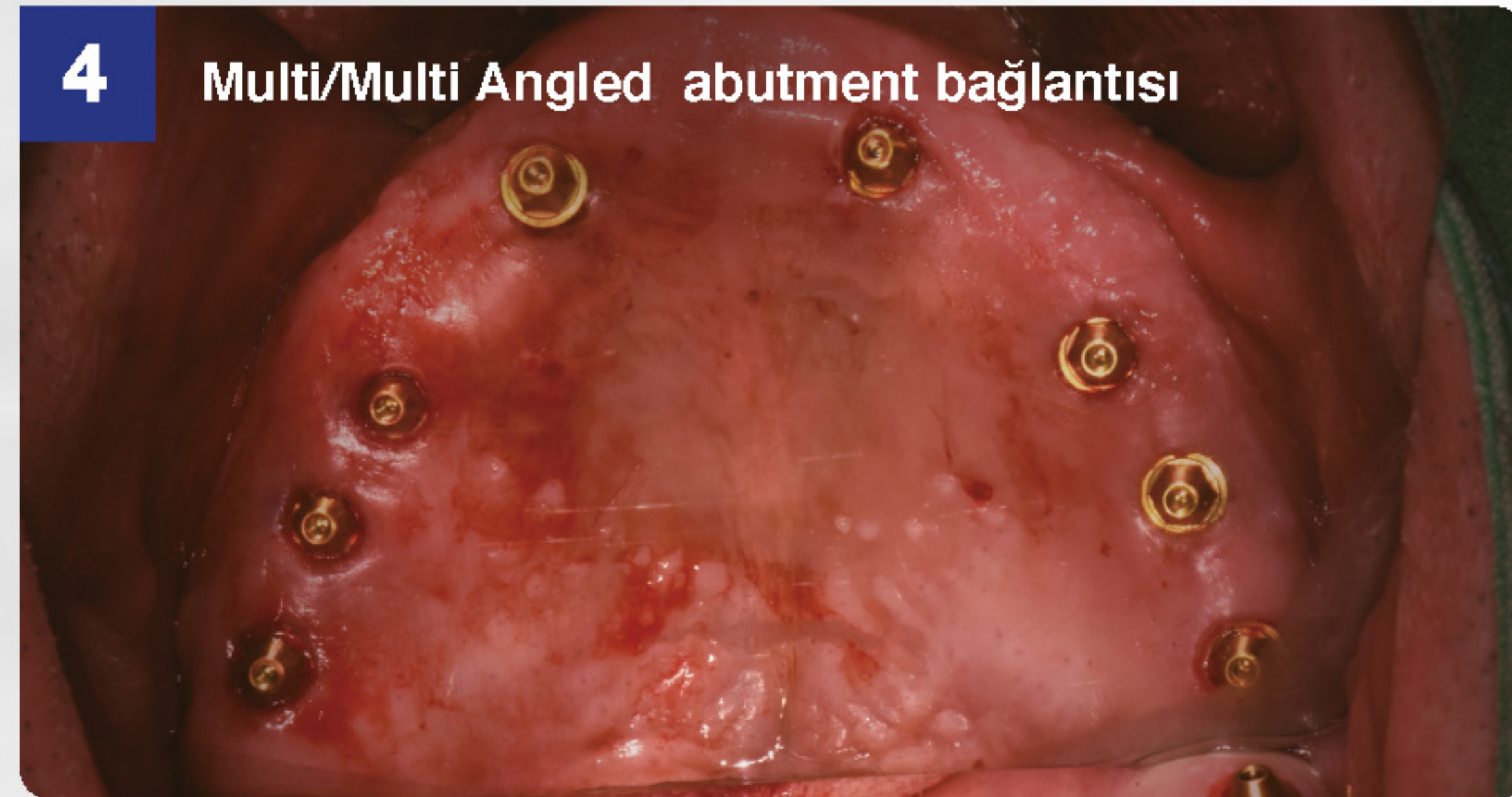

5 Scan Body bağlantısı

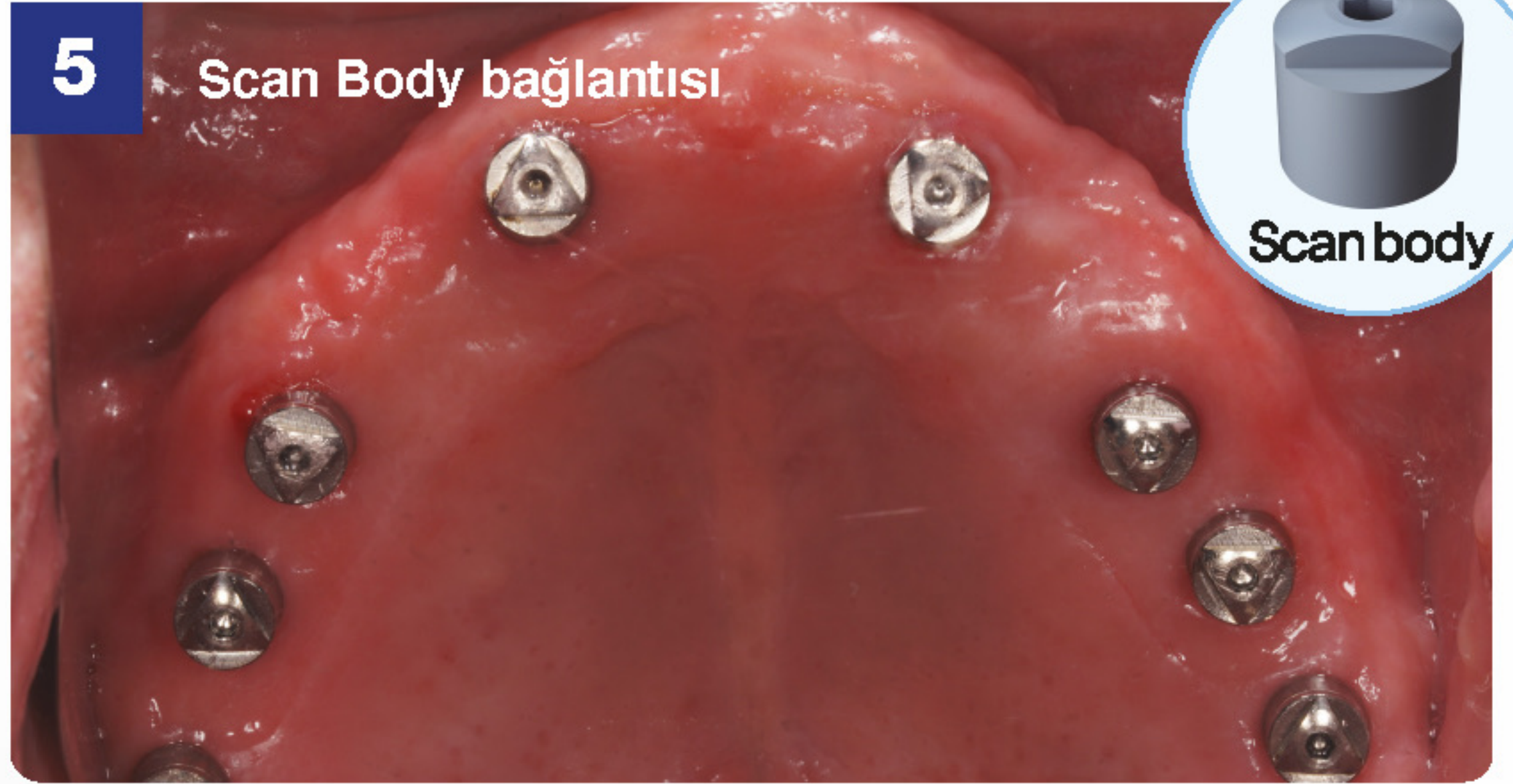

6 Ağız içi tarama

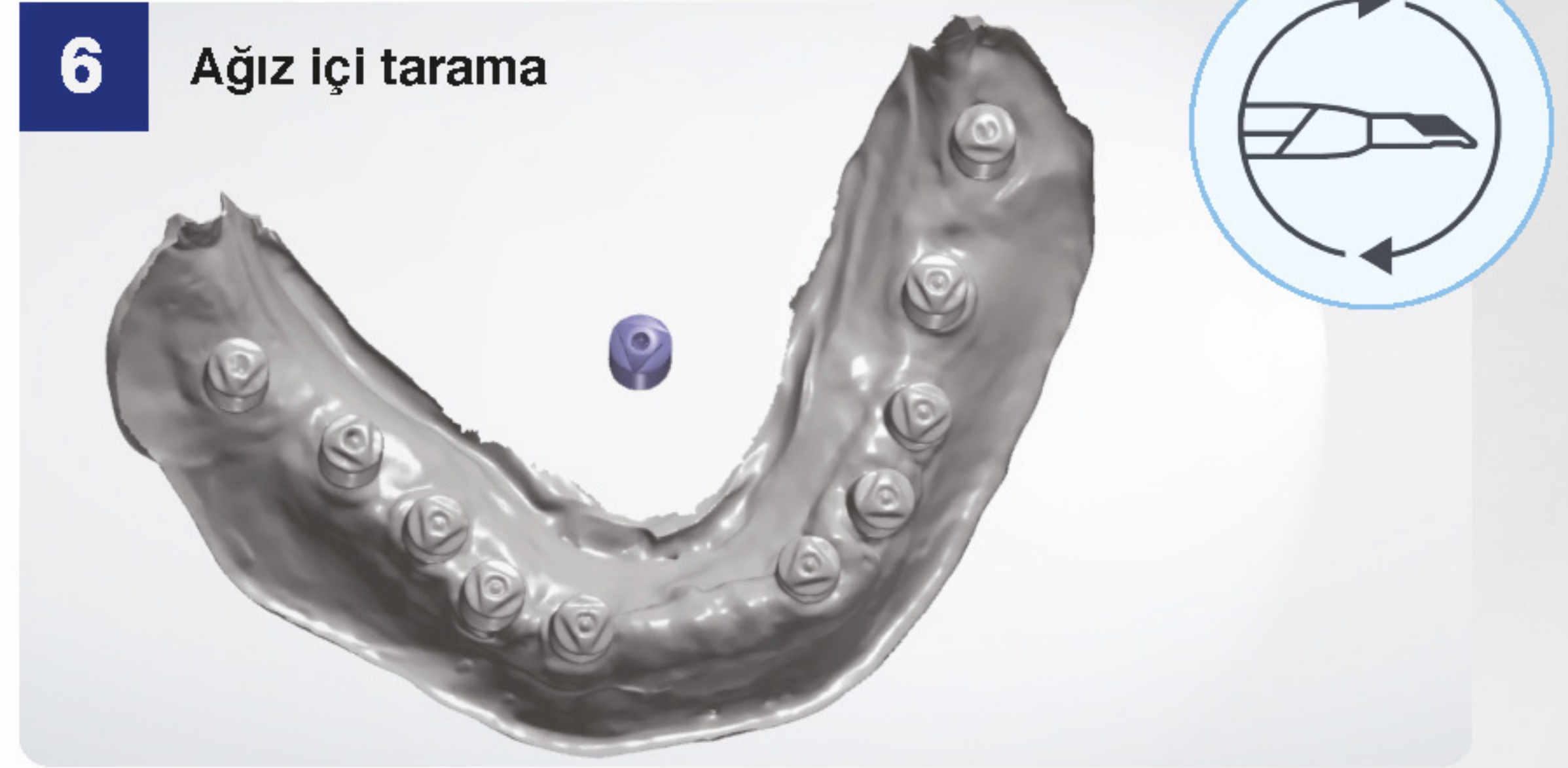

7 Vida-tipi protez dizaynı CAD Tasarımı

- ★ Uygun uzunlukla Ti-Base kütüphanesini seçiniz



8 Vida tipi protezin tamamlanması (Zirkonyum)



9 Vida tipi protez yerleşimi

