


485 KIT



- Yuvarlak uçlu frez sayesinde mandibular sinirin zarar görmesini engeller.
- Yetersiz kemik yüksekliğine rağmen güvenli frezleme mümkündür.
- Basit frezleme sekansı ile daha kısa operasyon süresi.

485 drill

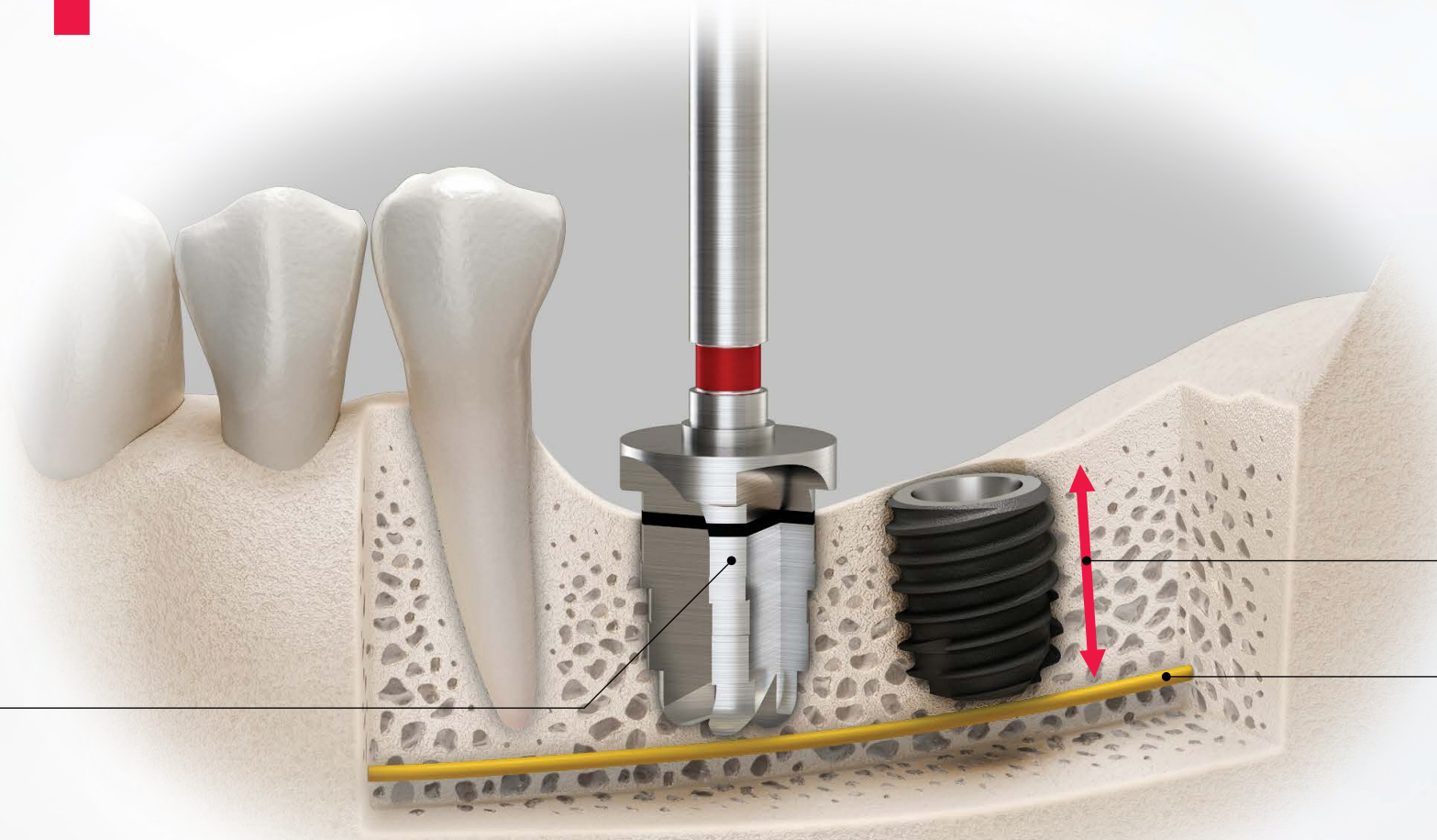


6mm'den daha kısa kemik yüksekliği

Inferior alveolar nerve

Yuvarlak Uçlu Frezleri Sayesinde Alt Alveolar Sinir Yaralanmasını Önler


- 485 Drill yuvarlak uçlu, böylece alt alveolar sinire zarar vermez.

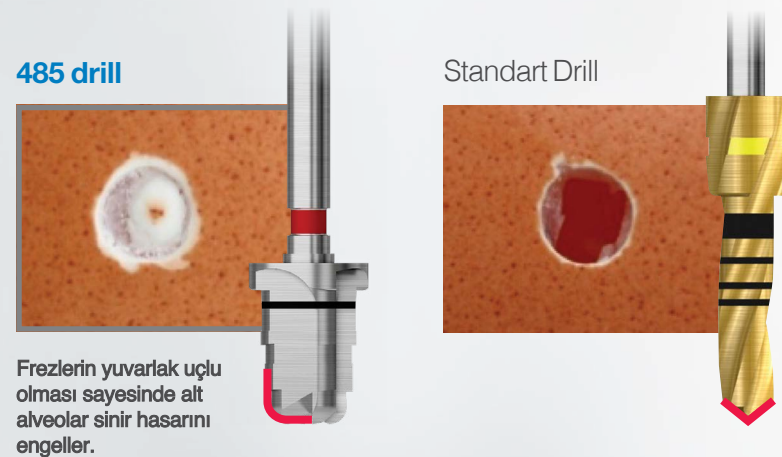

Frezlerin yuvarlak uçlu olması sayesinde alt alveolar sinir hasarını engeller.

Stopperlar Sayesinde Yetersiz Kemik Yüksekliğine Rağmen Güvenli Frezleme Mümkündür

- Stopperlarla kısa implantların güvenli frezlenmesi mümkündür. (1mm extra bljluk, çevre kemiğin etkilşimini en aza indirir.)
- 6mm'den az olan yetersiz kemik yüksekliğine rağmen sinirlere zarar vermez.

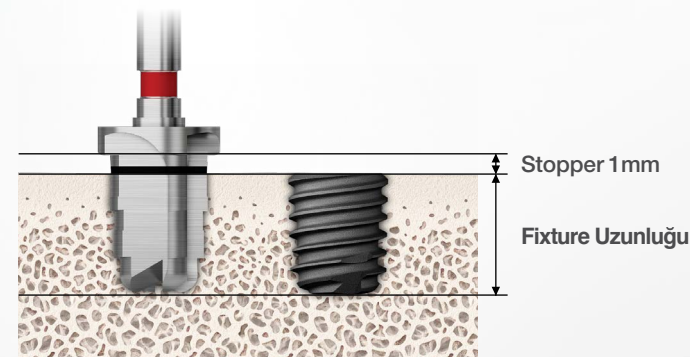


Stopper 1mm

Fixture Uzunluğu

Basit Frezleme Adımları ile Daha Kısa İmplant Süresi

- Normal kemik ve sert kemikte 2 adımda frezleme yeterlidir.

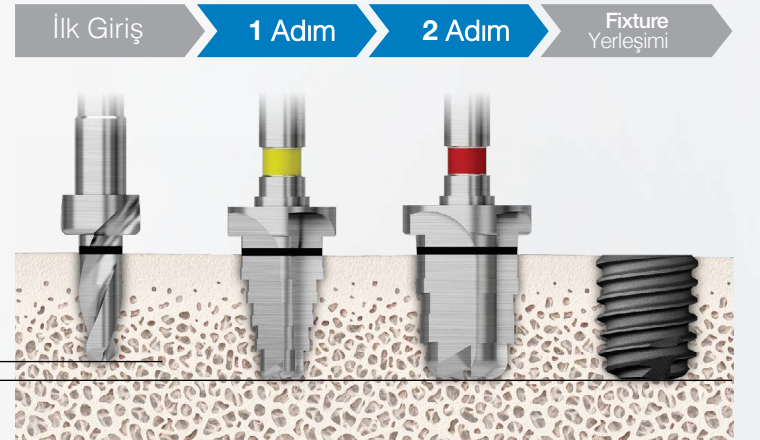

İlk Giriş

1 Adım

2 Adım

Fixture Yerleşimi


0.4 mm

Mandibula'da Güvenli Kısa İmplant Yerleşimi

485 KIT

- Yuvarlak uçlu frez sayesinde mandibular sinirin zarar görmesini önler.
- Yetersiz kemik yüksekliğine rağmen güvenli frezleme mümkündür.
- Basit frezleme sekansı ile daha kısa operasyon süresi

485 KIT ile yerleştirilebilen fixture dizilimi

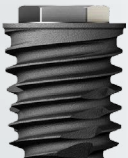Fixture Tipi	D\L	4mm	5mm	6mm	7mm	8.5mm
 TS III	F4.0	-	-	 Extra Short	 Nomal	 Nomal
	F4.5	-	-	 Extra Short	 Nomal	 Nomal
	F5.0	 Extra Short	 Extra Short	 Short	 Nomal	 Nomal
 SS III	F4.0	-	-	-	 Nomal	 Nomal
	F4.5	-	-	-	 Nomal	 Nomal
	F5.0	-	-	 Short	 Nomal	 Nomal
 US III	F4.0	-	-	-	 Nomal	 Nomal
	F4.5	-	-	-	 Nomal	 Nomal
	F5.0	-	-	 Short	 Nomal	 Nomal