


Konik İmplantların Yerleştirilmesi için Optimize Edilmiş Cerrahi KİT

OSSTEM[®]
IMPLANT

Taper KIT


Basit Frezleme Sekansı ile Daha Kısa İşlem Süresi

- Normal kemikte işlem süresini kısaltan 3 kez frezleme ile fixture yerleştirilebilir.

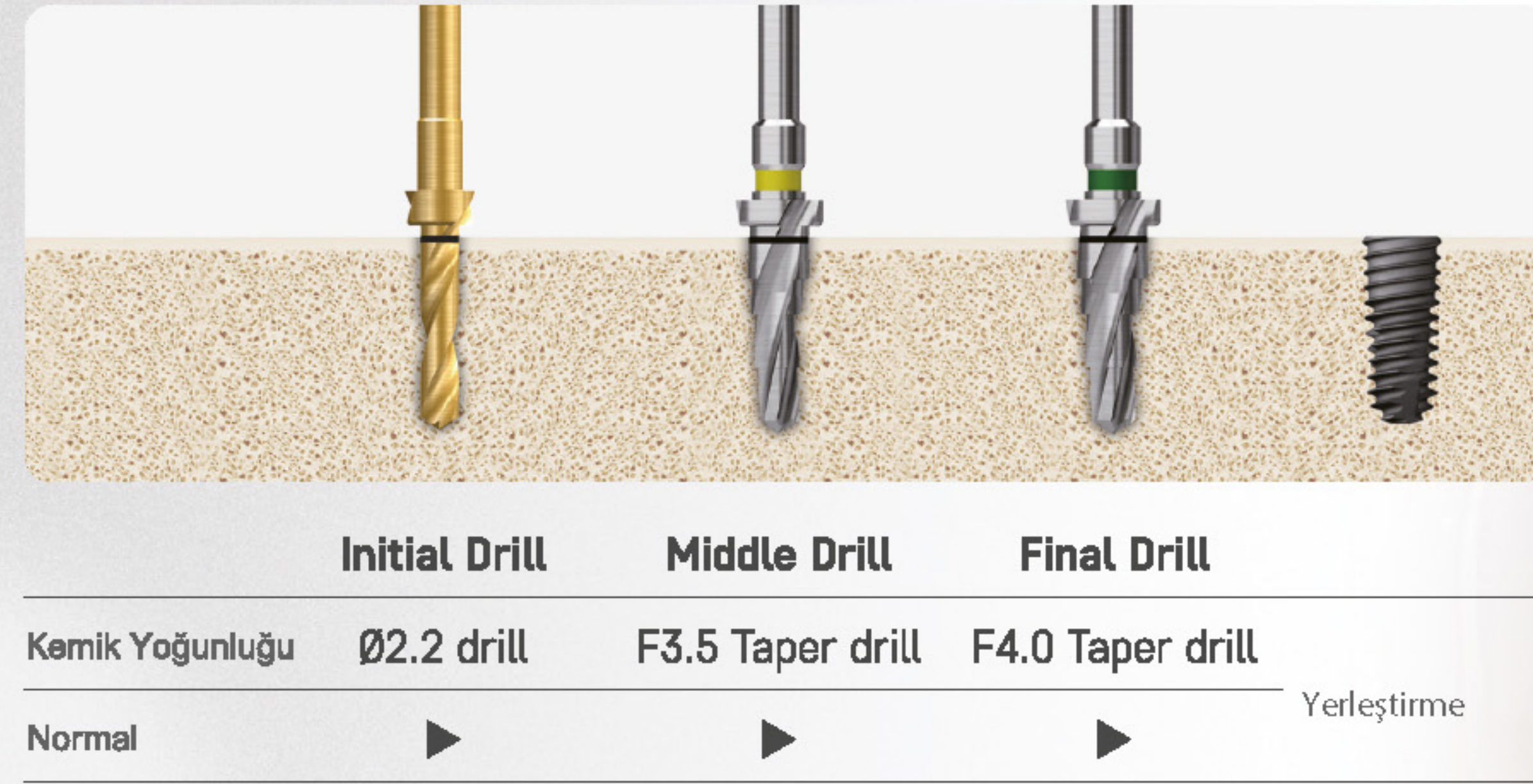


Konik İmplantlar için Optimize Edilmiş Tasarım

- Taper Drill'in çok kademeli şekli, konik implantlar ve kemik arasında optimum temas için tasarlanmıştır.
- Güçlü bir primer stabilite gerektirebilir.

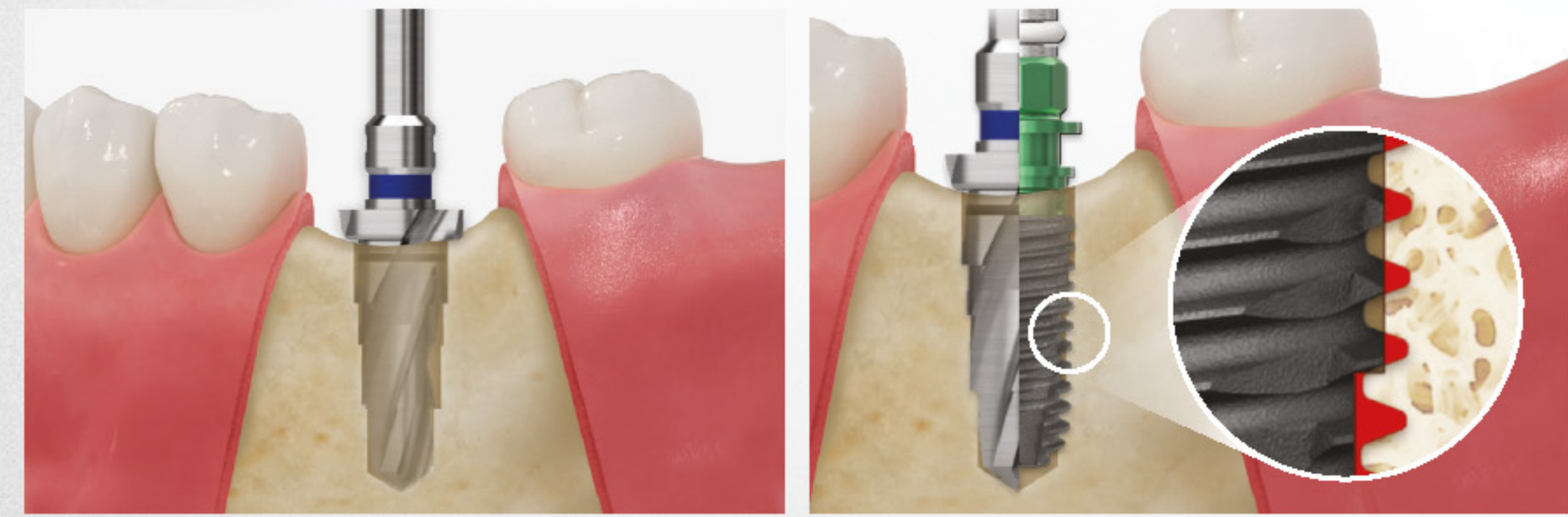

Güçlü Kesme Kuvveti ve Güvenli Delme

- Eşsiz tasarım ve mükemmel üretim tekniği ile gerçekleştirilen optimize edilmiş kesme performansı. Bu, birkaç orta frezin atlanmasına rağmen pürüzsüz ve hızlı delme sağlar.
- Entegre stoperler sayesinde güvenli bir şekilde frezleme işlemi gerçekleştirilir.

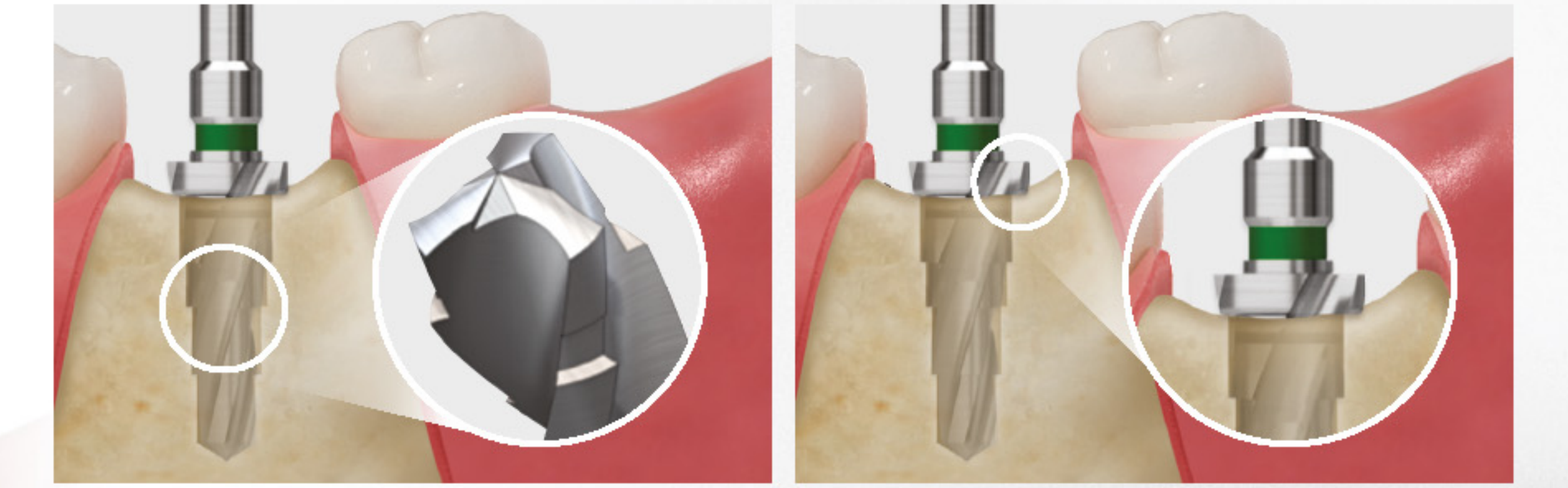


Üst düzey kesme performansı ile benzersiz frez tasarımı

Güvenlik için frez stoperi

Frezlerde Sıçrama Olmadan Düzgün Delme

- Frezlerin sallanmasını ve zıplamasını önleyen konik implantların çok kademeli şekli sayesinde Pilot Drill'e gerek yoktur.

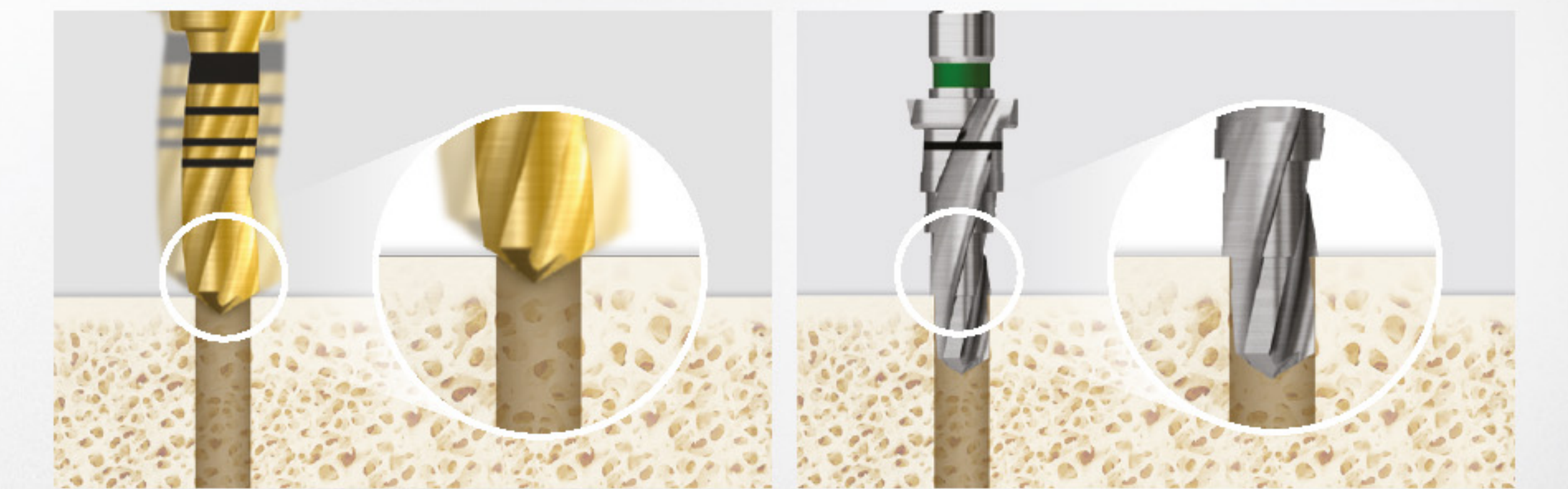

Standard düz frez

Konik Frez

I Taper Kit Bileşenleri

Frezeleme Parçaları

Guide Drill

- İmplant yerini işaretlemek için kullanılır
- Hekim frezleme işlemi gerçekleştirdiğinde kemik yoğunluğunu tespit edebilir.



SideCut Drill

- Frez yolunu genişletmek ve ayarlamak için kullanılır.
- Yandaki kesme bıçakları ile yanlara doğru kesme yapılabilir.



Twist Drill

- Başlangıç frezi Ø 2.2 / 3.0 düz frez



Parallel Pin

- Frezleme yolu açısını kontrol etmek için kullanılır.
- Ø2.2 / 3.0 frezleriyle delme işlemi sonrası soket kontrol edilebilir.





Drill Extension

- Frezlerin ve diğer el aletlerinin boyunu uzatmak için kullanılır.



Depth Gauge

- Frezleme derinliğini ölçmek için kullanılır.
- Açık anahtar işlevi vardır.

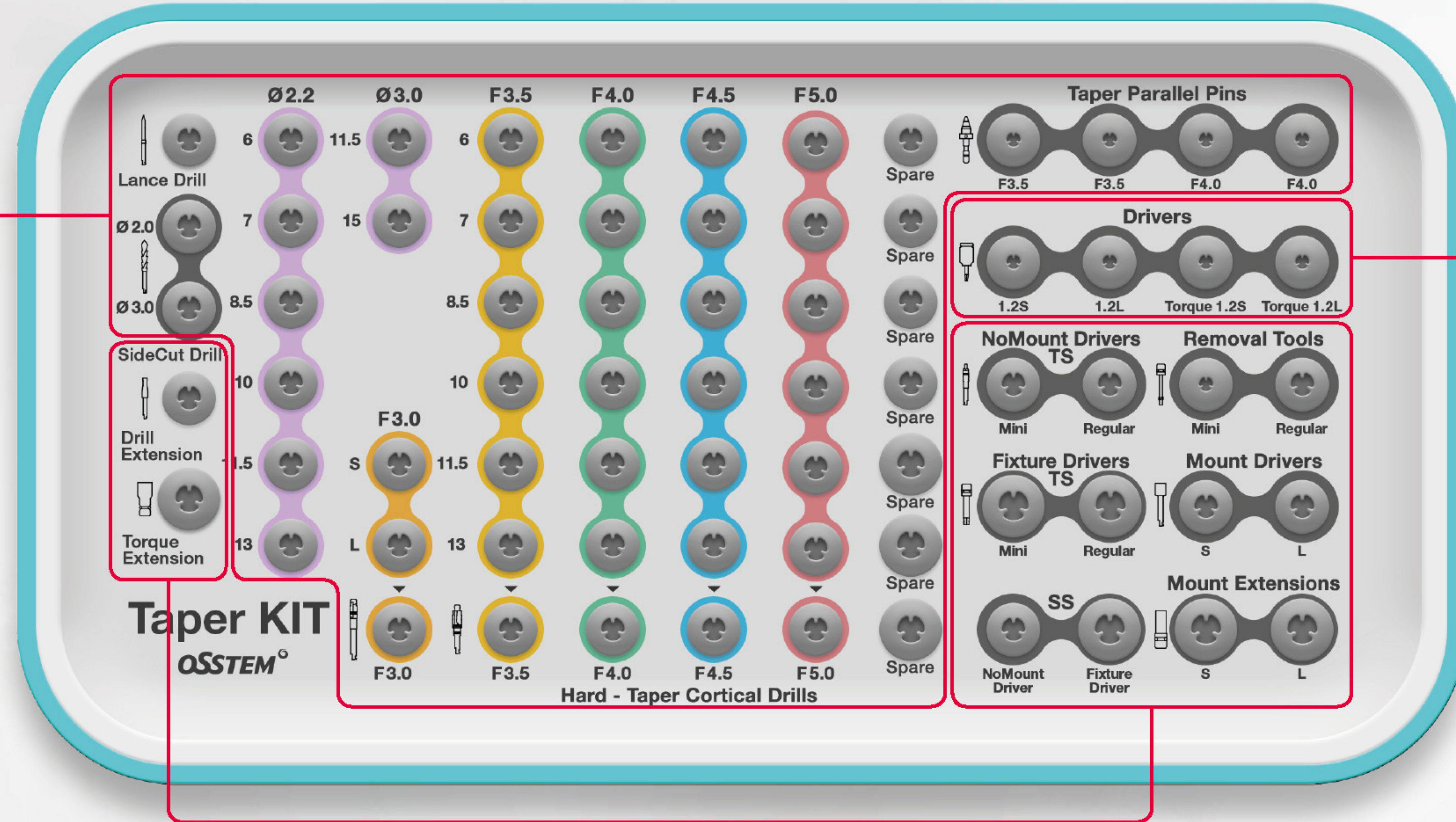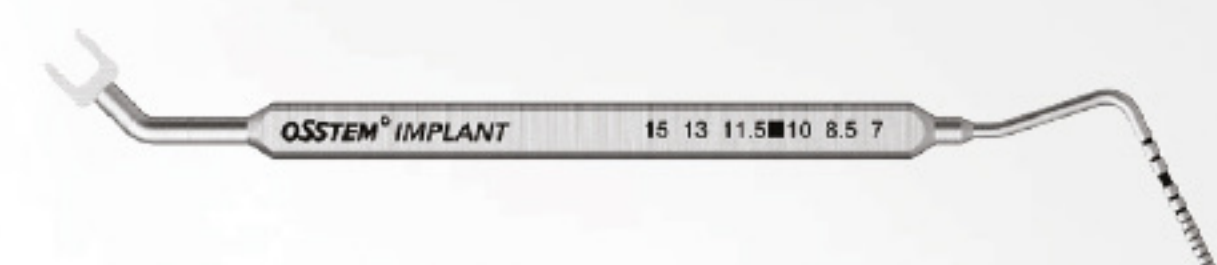

İmplant Yerleştirme Aletleri

Mount Driver

- Taşıma parçalı implantları yerleştirmek için kullanılır.



NoMount Driver

- Taşıma parçasız implantları yerleştirmek için kullanılır.



Fixture Driver

- Taşıma parçasız implantları cerrahi tork anahtarı vasıtasıyla yerleştirmek için kullanılır.




Mount Extension

- Taşıma parçalı implantlarda cerrahi tork anahtarı ile kullanılır.
- Taşıma parçalı implantların ek derinlik kontrolü için kullanılır.



Torque Extension

- Tork anahtarı ile kullanılan aletlerin boyunu uzatır. (+10mm)
- Bitişik dişlerin tork aletlerinin fonksiyonunu engellediği durumlarda kullanılır.

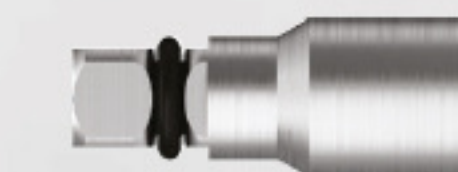

Torque Wrench(Bar)


- İmplantın yerleştirme derinliğini ayarlamak ve abutment vidasına belirli bir tork uygulamak için kullanılır.
- Çubuğu istenilen tork göstergesi üçgeninin ortasında yer alacak şekilde çekilerek uygulanır.



Abutment Yerleştirme Aletleri

Hand Driver

- Abutment ve vidaları genişletmek ya da sıkmak için kullanılır

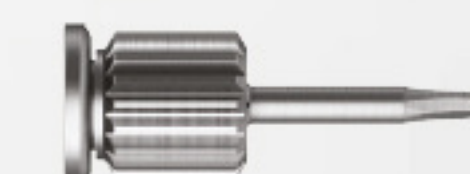

Mount Removal Tool

- Pre-mounted implant içerisine sıkışmış taşıma parçasını çıkarmak için kullanılır.



Torque Driver

- Abutment vidasına torku iletir.



Taper Drill

- İmplantların her bir çap spesifikasyonu için son frezdir.
- F3.5(Sarı), F4.0(Yeşil), F4.5(Mavi), F5.0(Kırmızı)



Taper Cortical Drill

- Aşırı torku önlemek için kortikal kemik seviyesinde ki soketi genişletir.
- F3.5(Sarı), F4.0(Yeşil), F4.5(Mavi), F5.0(Kırmızı)

