


Hassas ve Güvenli Cerrahi

OneGuide

- Frezleme aşamalarını önemli ölçüde kısaltır
- Açık tip bilezik aracılığıyla intermaxillary alan kısıtlamasına karşın 7 numaralı dişe implantasyon imkanı sunar
- Kemik ısınmasını minimize ederek hızlı cerrahi imkanı sunar

Frezeleme adımlarını kısaltın

- Sadece kemik kalitesine bakılarak 2-4 aşama ile implantasyon imkanı ex.TSIII Ø4.0

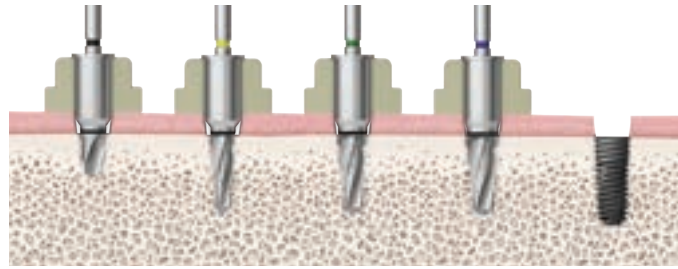

Bone Density	Initial	F3.5	F4.0	F4.5	Fixture
Soft	▲	▲			
Normal	■	■	■		
Hard	●	●		●	

Implant placement



Açık tip bilezik aracılığıyla intermaxillary alan kısıtlamasına karşın 7 numaralı dişe implantasyon imkanı sağlar

- Hastanın oral durumuna bağlı olarak açık tip bilezik aracılığıyla yerleştirilen drill, intermaxillary alan kısıtlamasını kusursuz şekilde çözme imkanı sunar
- Gerekliğinde açık yada kapalı tercihi

Yetersiz intermaxillary alan




Yeterli intermaxillary alan

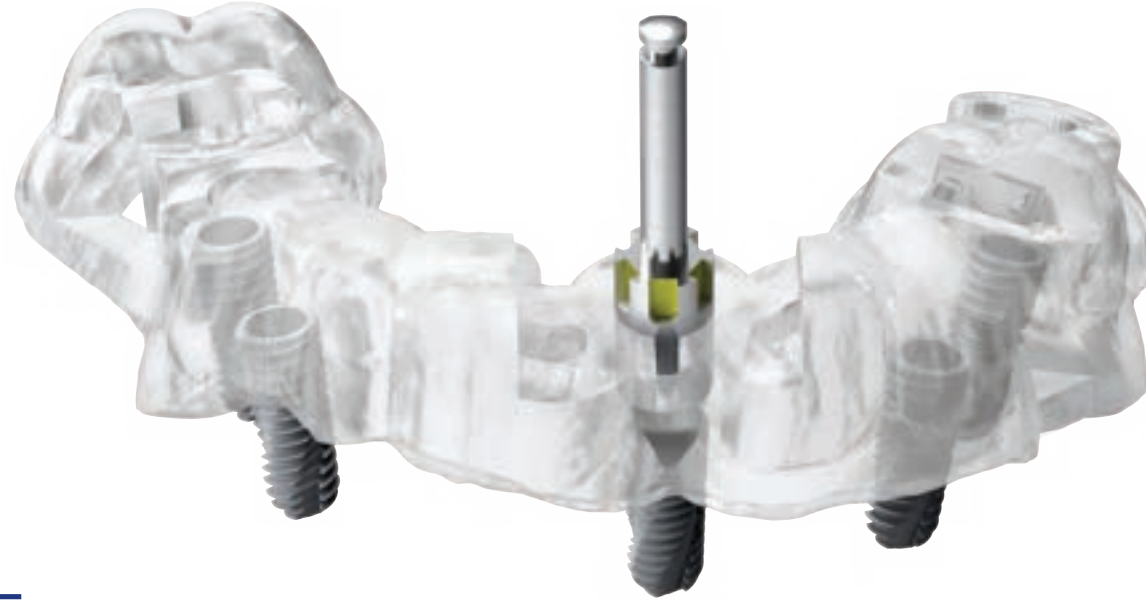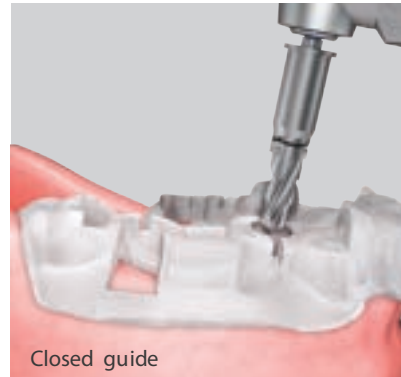



Sabit Frezleme ile hatasız implant imkanı sunar

- **İşaret Drilling:** 3mm genişliğindeki guide alanı ile temas etmesiyle sabit drilling imkanı sunar
- **Backward Drilling:** Taper Drill etkisi sayesinde guide alanı ile temas ederek sabit drilling imkanı sunar

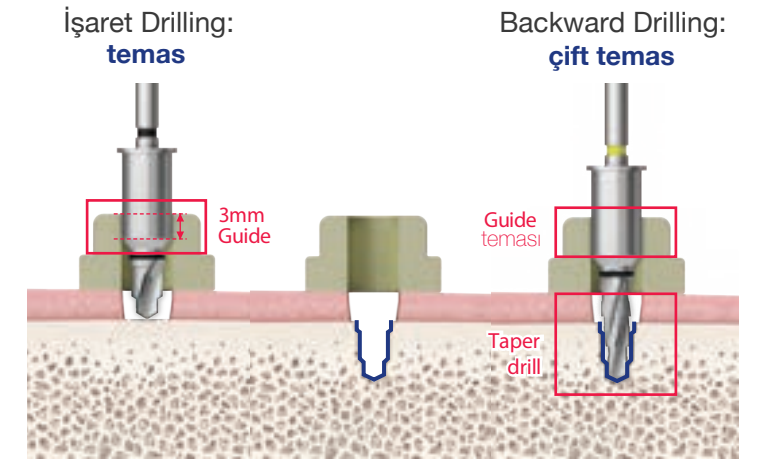


Kemik ısınmasını minimize ederek hızlı cerrahi imkanı sunar

One guide ile açık bilezikten serum fizyolojik sağlanarak üstün frezleme gücüyle ısınma olmadan hızlı frezleme imkanı sunar (önerilen rpm: 800 - 1,200rpm)

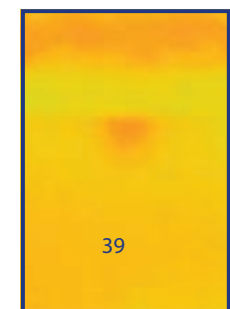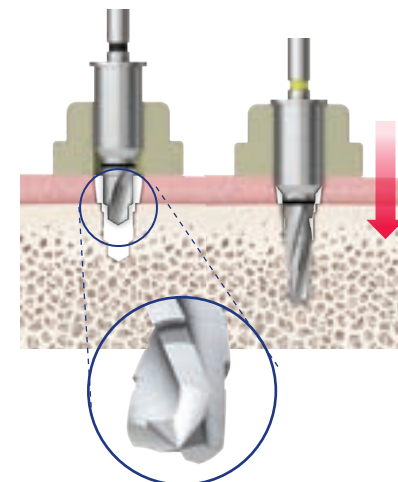

OneGuide drill

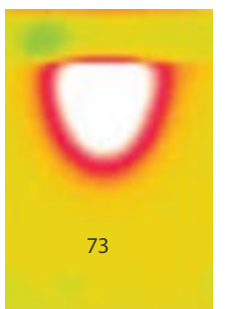

Conventional drill

OneGuide KIT

1. Initial Drill

- Tissue punch sonrasında implantın konumunun belirlenmesi
- Backward drill'in guide derinliğini belirleme
- 3 çeşit aletin birleşimi (F4.5 altı için / sadece F5.0 için / sadece F3.5 yumuşak kemik için)


2. Flattening Drill

- Dar yada eşit olmayan çıkıntılar için kullanılır
- Kesilen köşeleri etrafa sıçratmadan sabit kesim imkanı sunar.
- Kesilen köşeleri etrafa sıçratmadan sabit kesim imkanı sunar.


3. OneGuide Drill

- TSIII/IV optimize edilmiş fixture (Ø3.5~5.0 çapında , 7~13mm uzunluğunda implantasyon mümkün) Ø3.5~5.0, length 7~13mm fixture)
- Çok aşamalı yapısı sayesinde sabit frezleme
- 2 aletin birleşimi (F4.5 altı için / sadece F5.0 için) F3.5


F4.5 altı için (Ø5.0 kalıp deliği)

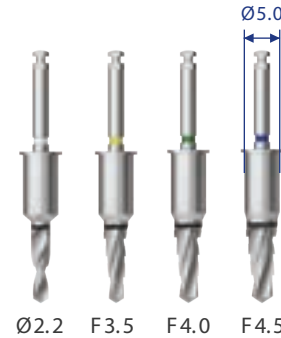

*OneGuide plak delikleri

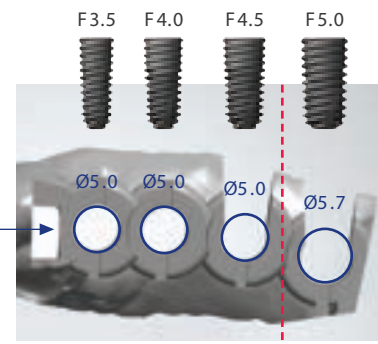


F5.0 (Ø5.7 kalıp deliği) Ø5.7

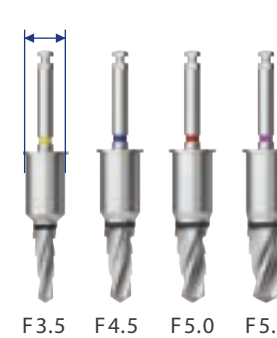


4. Tissue Punch

- Sadece gingiva kesisi için kullanılan aletler

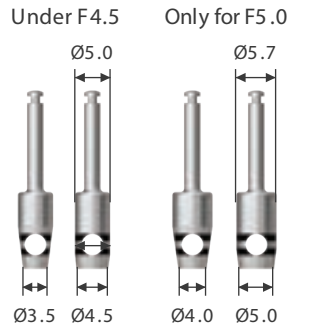


5. NoMount Driver

- Sadece OneGuide için

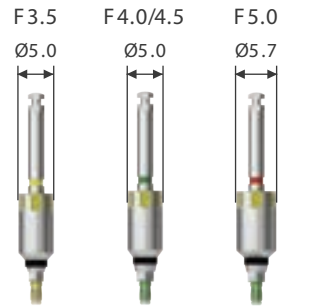

6. Fixture Driver

- Sadece OneGuide için

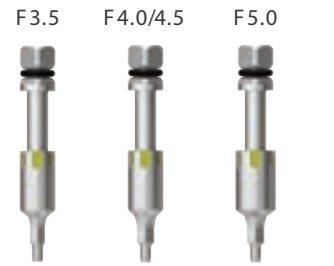

Drilling Sekansı

Fixture Diameter	Bone Density	Initial	Ø2.2	F3.5	F4.0	F4.5	F5.0	F5.5	Fix ture
F3.5	Soft	▲	▲						
	Normal	■	■	■					
	Hard	●	●	●	●				
F4.0	Soft	▲	▲	▲					
	Normal	■	■	■	■				
	Hard	●	●	●	●	●			
F4.5	Soft	▲	▲	▲	▲				
	Normal	■	■	■	■	■			
	Hard	●	●	●	●	●	●	●	F4.5 cortical
F5.0	Soft	▲	▲	▲	▲	▲			
	Normal	■	■	■	■	■	■		
	Hard	●	●	●	●	●	●	●	

Implant placement

İş Akışı

